

Тест **Maria Express** предназначен для выявления хорионического гонадотропина человека (HCГ) в моче для определения беременности на ранней стадии. Данный тест не требует никакого дополнительного оборудования.

*Предназначен только для диагностики in vitro.
Только для самотестирования.*

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ HCГ ТЕСТА

Хорионический гонадотропин человека (HCГ) является гормоном, который плацента выделяет в мочу вскоре после оплодотворения яйцеклетки. Тест на беременность содержит антитела, которые специфически вступают в реакцию с этим гормоном.

При попадании образца мочи на струйный тест, он под капиллярным воздействием движется вдоль мембраны. Когда содержащийся в образце HCГ достигает тестовой зоны мембраны, появляется цветная полоска. Отсутствие такой цветной полоски предполагает отрицательный результат теста.

Для контроля за выполнением теста цветная полоска должна появиться в контрольной зоне, если тест проведен правильно.

ТЕСТ: СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКТА

- Индивидуально запечатанная упаковка, в каждой:
 - струйный тест;
 - пакетик с поглотителем влаги; (поглотитель влаги предназначен только для хранения, и он не используется в процедуре проведения теста).
- Инструкция по применению.

ЧТО ЕЩЕ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ?

- Чистая, сухая, пластиковая или стеклянная тара для сбора мочи.
- Часы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОЖНОСТИ

- Комплект предназначен только для наружного применения. Не глотать.
- Все образцы мочи следует считать биологически опасным веществам.
- Выбросить после первого использования. Струйный тест нельзя использовать больше одного раза.
- Не использовать тестовый комплект по истечении срока хранения.
- Не используйте комплект, если упаковка проколота или плохо запечатана.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Все образцы мочи и использованные устройства представляют риск заражения инфекциями. Использованный тест-комплект следует утилизировать в соответствии с местными требованиями.

ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ ТЕСТА

- Тест следует хранить при температуре 4°C–30°C.
- Неоткрытый тест стабилен до истечения даты, указанной на упаковке.
- Бережь от попадания прямых солнечных лучей, влаги и нагрева.
- НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ.
- Тест следует использовать в течение 1 часа после вскрытия упаковки.


КОГДА ДЕЛАТЬ ТЕСТ?

Тест Maria Express можно проводить за 2 дня до начала вашего ожидаемого менструального цикла.

Для проведения теста на беременность подходит образец мочи, взятый в любое время суток, но образец первой утренней мочи является оптимальным из-за самой высокой концентрации HCГ.

КАК ДЕЛАТЬ ТЕСТ?

- Чтобы приступить к проведению теста, вскройте запечатанную упаковку по линии отрыва. Выньте струйный тест из упаковки.
- Возьмите круглый конец одной рукой. Второй рукой снимите колпачок струйного теста, открывая абсорбент.
- Опустите конец с абсорбентом вниз, подставьте его под струю мочи по крайней мере на 10 секунд, до полного промокания. **Избегайте попадания мочи на пластмассовое окошко (выше отметки в виде стрелки).** Или вы можете собрать мочу в чистую тару и опустить туда конец с абсорбентом на 3 секунды.
- Вновь наденьте колпачок на струйный тест и подождите до появления цветных полос. Положительный результат можно увидеть через 1 минуту. Однако, чтобы подтвердить отрицательный результат, необходимы 3 минуты на полную реакцию. **Не считывайте результат по истечении 5 минут.**

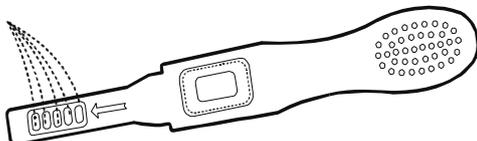

Конец с абсорбентом

КАК СЧИТЫВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ?

Отрицательный (беременности нет):


Появляется только одна цветная полоска, в контрольной зоне (C). В тестовой зоне (T) не появляется явная полоска. Это указывает на то, что беременность не наступила.

Положительный (беременность есть):

Отчетливая цветная полоска появляется в контрольной (C) и тестовой зоне (T). Это указывает на то, что вы беременны. ВАЖНО: если цветная полоска в тестовой зоне (T) менее ярко выражена, рекомендуется повторить тест через 48 часов.

Недействительный:

Если красная полоска в контрольной зоне (C) не появилась в течение 5 минут, тест считается недействительным. Возможно, вы неправильно выполняли процедуру теста, или тест-комплект был поврежден. Повторите процедуру, используя новый тест-комплект. Если результат повторного теста недействителен, свяжитесь с дистрибьютором и укажите номер партии.

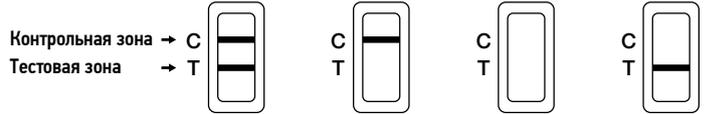

Положительный Отрицательный Недействительный Недействительный

ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЫ УЗНАЛИ РЕЗУЛЬТАТ?

ЕСЛИ РЕЗУЛЬТАТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ (ДВЕ ПОЛОСКИ)

Проконсультируйтесь с врачом. Он должен подтвердить вашу беременность после оценки всех клинических и лабораторных данных. Так, в определенных условиях тест может показать ложный положительный результат. Врач также предоставит вам подробную информацию и проконсультирует вас по вопросам, связанным с беременностью. Смотрите раздел «ОГРАНИЧЕНИЯ».

ЕСЛИ РЕЗУЛЬТАТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ (ОДНА ПОЛОСКА)

Если у вас есть основания полагать, что вы беременны (например, нет менструального кровотечения), вы можете повторить тест через несколько дней. Если повторный тест также отрицательный, проконсультируйтесь с вашим врачом. Смотрите раздел «ОГРАНИЧЕНИЯ».

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Во время проведения теста следуйте процедуре проведения теста, мерам предосторожности и правильному считыванию результатов теста.
- Как и с любой другой диагностической процедурой, подтвердить беременность должен только врач после оценки всех клинических и лабораторных результатов.
- Если образец мочи слишком слабой концентрации (т.е., низкий удельный вес), в нем не может содержаться типичный уровень HCГ. В случае подозрения на беременность, следует повторить тест через 48 часов после проведения первого теста.
- Низкая концентрация HCГ на самых ранних сроках беременности может дать отрицательный результат. В этом случае следует повторить тест с другим образцом мочи не раньше чем через 48 часов.
- Наличие уровня HCГ может быть вызвано не только беременностью. Поэтому, присутствие HCГ в моче не следует толковать, как наличие беременности, если только не исключены другие обстоятельства.
- Нормальную беременность невозможно отличить от внематочной беременности только на основании уровня HCГ. Также самопроизвольный выкидыш может дать неправильный результат теста.
- Лечение бесплодия на основе определения HCГ может привести к ложным результатам. Проконсультируйтесь с врачом.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ТЕСТА К HCГ

Тест на беременность Maria Express обнаруживает HCГ в моче при его концентрации, начиная от 20 мМЕ/мл и выше.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

- Есть большая разница по цвету между контрольными полосками двух тестов. Стоит ли об этом беспокоиться?** Нет. Различия в цвете контрольной полоски не влияют на результат теста.
- Можно ли считывать результат теста по истечении более пяти минут?** Нет. Результат теста необходимо читать в течение 5 минут. Хотя положительный результат не должен меняться в течение нескольких дней, отрицательный результат может измениться на ложноположительный в течение нескольких минут после окончания тестирования, что уже не будет точным показателем. Всегда лучше читать результат на пятой минуте тестирования, а затем выбросить тест во избежание недоразумений.
- В зоне результата появился розовый фоновый цвет и вертикальные полоски во время тестирования. Стоит ли об этом беспокоиться?** Нет. Химический состав каждого образца мочи может меняться, а также может меняться уровень влажности воздуха в помещении (комнате), где проводится тест. Такие колебания в физических условиях могут привести к появлению вертикальных полос и/или розового фонового цвета, но не повлияют на результат теста. Если в течение пяти минут появилась контрольная полоска, тест проведен правильно.
- У меня нерегулярная менструация, когда мне следует проводить тест?** Вам следует брать в расчет самый продолжительный цикл за последние месяцы перед проведением теста.