




► Пожалуйста, перед применением внимательно прочтите инструкцию!

Maria Strip hCG тест на беременность – быстрый тест на определение беременности, который Вы можете сделать сами. Он позволяет определить наличие хорионического гонадотропина (hCG) человека, который появляется в моче уже на ранних сроках беременности. Использовать только в диагностике *in vitro*. Не для внутреннего применения.

КАК ЭТО ДЕЙСТВУЕТ?

Хорионический гонадотропин человека – гормон, выделяемый плацентой во время беременности, который появляется в моче. Тест на беременность содержит антитела, которые реагируют именно с этими гормонами. Когда тестовая полоска погружается в образец мочи, в результате капиллярного действия, образец перемещается по мембране. Когда гормон hCG в образце достигает регион зоны тестирования мембраны, там появляется цветовая полоска. Если такая цветовая полоска отсутствует, это означает, что результат отрицательный.

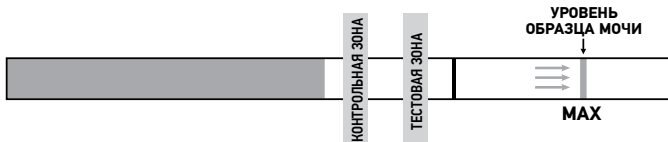

КОМПЛЕКТ ТЕСТА СОДЕРЖИТ:

1. Упаковочный мешочек с одной тестовой полоской и пакетик с абсорбентом влажности. Абсорбент предназначен исключительно для хранения и не используется для тестовых процедур.
2. Инструкция по применению.

ЧТО ВАМ ЕЩЕ НЕОБХОДИМО?

1. Чистая, сухая пластмассовая или стеклянная емкость для мочи.
2. Таймер (часы).

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Комплект MARIA STRIP не предусмотрен для внутреннего применения. Не глотать.
2. После первого использования выбросить. Тестовая полоска не предусмотрена к вторичному использованию.
3. Не используйте набор после истечения срока годности.
4. Не используйте комплект, если повреждена упаковка, или она не плотно закрыта.
5. Хранить в недоступном для детей месте.

ХРАНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Хранить при температуре 4°-30°C, в закрытой упаковке.
2. Хранить вдали от прямых солнечных лучей, воздействия влаги и тепла.
3. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!
4. Упаковку рекомендуется открывать незадолго до тестирования.

ЗАБОР ОБРАЗЦА И ПОДГОТОВКА

КОГДА СОБРАТЬ ОБРАЗЕЦ ДЛЯ MARIA STRIP ТЕСТА ПО МОЧЕ НА БЕРЕМЕННОСТЬ?

Для теста на беременность подойдет любой образец мочи, но лучшей является утренняя моча, поскольку в ней имеется самая высокая концентрация hCG.

КАК СОБРАТЬ УРИНУ?

Соберите образец мочи в любую чистую и сухую пластмассовую или стеклянную емкость.

ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ

1. Перед процедурой тестирования теста MARIA STRIP тестовую полоску и мочу хранить при комнатной температуре (15-30° C).
2. Возьмите тестовую полоску из закрытой упаковки.
3. Погрузите тестовую полоску в образец мочи таким образом, чтобы стрелка указывала на образец мочи. Через 3 секунды вытащите тестовую полоску и поместите ее на чистую, сухую и не впитывающую поверхность (напр. на отверстие емкости образца мочи). **ВАЖНО!** Уровень образца не должен заходить за отметку MAX, в противном случае тест будет неверным.



4. Положительный результат теста можно получить через 1 минуту.

Однако, чтобы удостовериться в отрицательном результате, необходимы 3 минуты.

Результат проверяйте ровно через 5 минут после процедуры тестирования и не позднее!


ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Отрицательный (не беременна):

В контрольной зоне появилась только одна цветовая полоска. В зоне тестирования нет видимой полоски. Это означает, что беременность не была установлена.

Положительный (беременность наступила):

В контрольной зоне и зоне тестирования четко видны цветовые полоски. Они указывают, что беременность наступила. Интенсивность цвета полоски теста может отличаться, поскольку на различных стадиях беременности концентрация гормона hCG отличается.

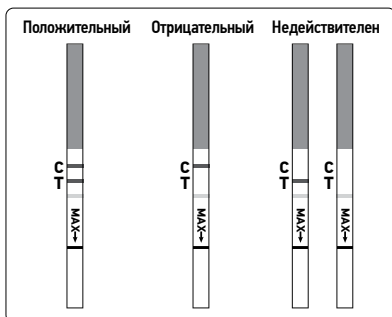

Недействительный:

После процедуры тестирования в контрольной зоне нет видимой полоски или полоски вообще нет ни в одной из зон. Повторите процедуру, используя новый комплект теста. Если результат теста все еще отрицательный, свяжитесь с распространителем, укажите номер серии.

ПРИМЕЧАНИЕ: если цвет в тестовой области является невыразительным, тест рекомендуется повторить через 48 часов.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ

ЕСЛИ РЕЗУЛЬТАТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ (ДВЕ ПОЛОСКИ)?

Консультируйтесь с врачом. С помощью клинических и лабораторных исследований врач должен подтвердить факт беременности. Но, при определенных обстоятельствах, тест может дать ложные положительные результаты. Врач даст вам подробную информацию о беременности. См. раздел «Ограничения теста».

ЕСЛИ РЕЗУЛЬТАТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ (ОДНА ПОЛОСКА)?

Если у вас есть основания полагать, что беременность наступила (например, нет менструации), то можете повторить тест через несколько дней. Если тест по-прежнему отрицательный, проконсультируйтесь с врачом. См. раздел «Ограничения теста».

ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕСТА

1. Как и при любой другой диагностической процедуре, беременность может подтвердить только врач, после проведения всех клинических и лабораторных исследований.
2. Если образец мочи слишком разбавлен (т.е. низкий удельный вес), то может быть недостаточный уровень hCG. Если есть подозрение, что беременность наступила, через 48 часов еще раз соберите образец мочи и пройдите тестирование.
3. На очень ранних сроках беременности очень низкая концентрация hCG может дать отрицательный результат. В этом случае, по крайней мере, 48 часов спустя надо набрать новый образец и повторить тестирование.
4. Повышенный уровень hCG может вызвать не только беременность, но и ряд других условий. Поэтому, наличие hCG в моче нельзя использовать как средство для диагностики беременности, пока не исключены другие условия.
5. Только основываясь на уровне hCG не возможно отличить нормальную беременность от внематочной беременности. А так же, выкидыш может привести к путанице в интерпретации результатов тестирования.
6. Лечение бесплодия на основе hCG может привести к ошибочным результатам. Проконсультируйтесь с врачом.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Отрицательные результаты ожидаются у женщин детородного возраста, которые не беременны, и здоровых мужчин. Хотя уровень hCG у женщин с нормальной беременностью на ранней стадии отличается, одноэтапный тест мочи на беременность позволяет обнаруживать беременность уже в течение 1-го дня после первой отсутствующей менструации.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Чувствительность

Maria Strip hCG тест по моче на беременность определяет концентрацию hCG в моче - 25mIU/mL или больше.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

1. **Есть большая цветовая разница между контрольными полосками двух тестов. Это повод для беспокойства?** Нет. Цветовая разница контрольной полоски не влияет на результат теста.
2. **Можно ли результат тестирования прочесть после истечения 5 минут?** Нет. Результаты теста необходимо считать ровно через 5 минут после тестирования. Хотя положительный результат, как правило, не меняется в течение нескольких дней, отрицательный результат может измениться на ошибочно положительный по истечении пяти минут после тестового периода, в результате чего результат может быть неверным. Поэтому, чтобы избежать недоразумений, всегда рекомендуется прочесть результат теста на 5-ой минуте после процедуры тестирования и потом тест выбросить.
3. **Розовый фон и вертикальные штрихи появились в зоне результата в течение периода тестирования. Является ли это поводом для беспокойства?** Нет. Каждый образец мочи отличается по своему химическому составу, а также он зависит от влажности воздуха в зоне (помещении) проведения теста. Такие изменения физических условий могут вызвать вертикальные штрихи и/или розовый фон, но это не влияет на результаты теста. Если контрольная полоска держится в течение пяти минут, то тест проводится правильным образом.

ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ НА УПАКОВКЕ

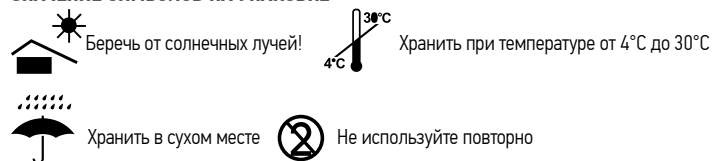

Производитель: Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd.

No.8, Lizhishan Road, Science City, Luogang District, 510663, Guangzhou, China.

Уполномоченный представитель в ЕС: Qarad b.v.b.a., Ciplastraat 3, B-2440 GEEL, Belgium.

Распространитель: OOO Elvim, Курземес проспект 36, Рига, Латвия.

Тел.: +371 67 808440.

www.marialine.lv

Ревизионный номер MS 012014

