



Maria baby strip

Одноэтапный тест для определения овуляции


Maria Baby Strip это одноэтапный тест для определения овуляции, который используют, чтобы определить наблюдается ли резкое увеличение количества лютеинизирующего гормона (ЛГ) в моче, что, в свою очередь говорит о возможном времени овуляции. Использовать только в диагностике *in vitro*. Не для внутреннего применения.

КАК ЭТО ДЕЙСТВУЕТ?

В середине менструального цикла у женщин детородного возраста резко возрастает количество содержащегося в моче лютеинизирующего гормона (ЛГ). ЛГ вызывает овуляцию, во время которой яйцеклетка выводится из яичника. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) указывают, что тест ЛГ является надежным способом определения овуляции. Овуляция обычно происходит в течение 24-48 часов после положительного результата теста.

Когда тестовая полоска погружается в образец мочи, в результате капиллярного действия, образец перемещается по мембране. Когда ЛГ в образце достигает регион зоны тестирования мембраны, появляется цветовая линия. Если такая цветовая полоска отсутствует, это означает, что результат отрицательный.

Тестовая полоска овуляцию определяет с высокой степенью точности. С ее помощью можно определить время, когда наилучшие условия для слияния яйцеклетки и сперматозоида. В силу различных причин, напр. эмоции и другие факторы, овуляция может быть нерегулярной. Не следует предполагать, что овуляция всегда будет проходить в одно и то же время после менструации. Поэтому, во время каждого менструального цикла вам надо проводить повторное тестирование.

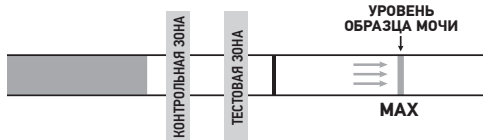

КОМПЛЕКТ ТЕСТА СОДЕРЖИТ:

1. Упаковочный мешочек с одной тестовой полоской и пакетик с абсорбентом. Абсорбент предназначен исключительно для хранения и не используется для тестовых процедур.
2. Инструкция по применению.

ЧТО ВАМ ЕЩЕ НЕОБХОДИМО?

1. Чистая, сухая пластмассовая или стеклянная емкость для мочи.
2. Таймер (часы).

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Комплект **Maria Baby Strip** не предусмотрен для внутреннего применения. Не глотать.
2. После первого использования выбросить. Тестовая полоска не предусмотрена к вторичному использованию.
3. Не используйте набор после истечения срока годности.
4. Не используйте комплект, если повреждена упаковка, или она не плотно закрыта.
5. Хранить в недоступном для детей месте.

ХРАНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Хранить при температуре 4°-30°C, в закрытой упаковке.
2. Хранить вдали от прямых солнечных лучей, воздействия влаги и тепла.
3. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!
4. Упаковку рекомендуется открывать незадолго до тестирования.

ЗАБОР ОБРАЗЦА И ПОДГОТОВКА

КОГДА СОБРАТЬ ОБРАЗЕЦ ДЛЯ MARIA BABY STRIP ТЕСТА ПО МОЧЕ НА БЕРЕМЕННОСТЬ?

Для тестирования подходит любой образец мочи.

КАК СОБРАТЬ УРИНУ?

Соберите образец мочи в любую чистую и сухую пластмассовую или стеклянную емкость.

КОГДА НАЧАТЬ ТЕСТ?

Продолжительность менструального цикла – это временный промежуток с первого дня менструального кровотечения до дня перед началом следующей менструации. Перед тестированием определите продолжительность менструального цикла. Для определения времени, чтобы начать тест, пожалуйста, смотрите указанную ниже схему. Если ваш цикл короче, чем 21 день, или дольше, чем 38 дней, пожалуйста, свяжитесь с вашим врачом. Если вы не знаете продолжительность вашего цикла, вы можете начать тест через 11 дней после первого периода, так как средняя длина цикла составляет 28 дней. Сделайте 1 тест в день пятидневного периода, или, когда заметите резкое увеличение количества ЛГ.

СХЕМА ЦИКЛА

| время цикла | день цикла, когда начать тестирование | время цикла | день цикла, когда начать тестирование |
|-------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| 21 день | 5. день | 31 день | 15. день |
| 22 дня | 6. день | 32 дня | 16. день |
| 23 дня | 7. день | 33 дня | 17. день |
| 24 дня | 8. день | 34 дня | 18. день |
| 25 дней | 9. день | 35 дней | 19. день |
| 26 дней | 10. день | 36 дней | 20. день |
| 27 дней | 11. день | 37 дней | 21. день |
| 28 дней | 12. день | 38 дней | 22. день |
| 29 дней | 13. день | 39 дней | 23. день |
| 30 дней | 14. день | 40 дней | 24. день |

Пример: Если ваш цикл длится двадцать шесть дней, то схема цикла показывает, что тест надо начать на десятый день. Этот календарь показывает, как определить десятый день.

ОБРАЗЕЦ КАЛЕНДАРЯ

| | | | | | | |
|----|----|----------------|----|------------------|----|----|
| 1 | 2 | 3 + 1. день | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 # 10. день | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

3+ = Первый день менструального кровотечения

12# = День для начала теста (10. день)

ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ

1. Перед процедурой тестирования тестовую полоску и мочу хранить при комнатной температуре.
2. Возьмите тестовую полоску из закрытой упаковки.
3. Погрузите тестовую полоску в образец мочи таким образом, чтобы стрелка указывала на образец мочи. Через 3 секунды вытащите тестовую полоску и поместите ее на чистую, сухую и не впитывающую поверхность (напр. на отверстие емкости образца мочи).
4. Подождите 5 минут и потом прочтите результат. **Результат проверяйте ровно через 5 минут после процедуры тестирования и не позднее!**




ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Негативный результат (нет резкого увеличения количества ЛГ в моче):

- 1) в контрольной зоне появилась только одна полоска;
- 2) линия появилась в тестовой зоне, но она светлее, чем контрольная линия.

Позитивный результат (резкое увеличение количества ЛГ в моче): если видны две цветные полоски и тестовая полоска такого же цвета, как контрольная полоска, или темнее – ожидается, что в течение ближайших 24-48 часов начнется овуляция. Если вы пытаетесь забеременеть, лучшее время для полового акта это 24 часа (но не позднее, чем 48 часов) после положительного результата теста.

Недействительный результат: после процедуры тестирования в контрольной зоне нет видимой полоски или полоски вообще нет ни в одной из зон. Повторите процедуру, используя новый комплект теста. Если результат теста все еще недействительный, свяжитесь с распространителем, укажите номер серии.

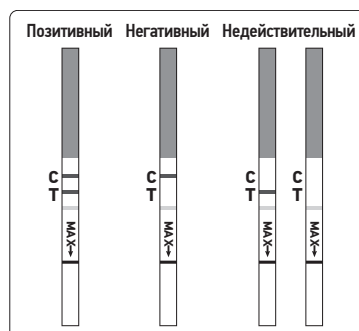

ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕСТА

1. Тест действует только в случае точного соблюдения инструкций.
2. Этот тест не следует использовать для контрацепции.
3. Если у вас цикл нерегулярен или необычно долгий, проконсультируйтесь с врачом.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чувствительность

Maria Baby Strip тест для определения овуляции определяет концентрацию ЛН в моче – 25mIU/mL или больше.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

1. **Есть большая цветовая разница между контрольными полосками двух тестов. Это повод для беспокойства?** Нет. Цветовая разница контрольной полоски не влияет на результат теста.
2. **Можно ли результат тестирования прочесть после истечения 5 минут?** Нет. Результаты теста необходимо считать ровно через 5 минут после тестирования. Хотя положительный результат, как правило, не меняется в течение нескольких дней, отрицательный результат может измениться на ошибочно положительный по истечении пяти минут после тестового периода, в результате чего измерение может быть некорректным. Поэтому, чтобы избежать недоразумений, всегда рекомендуется прочесть результат теста на 5-ой минуте после процедуры тестирования и потом тест выбросить.
3. **Как долго мне продолжать делать тест MARIA BABY STRIP?** Хотя бы 5 дней, или до наблюдаемого резкого увеличения ЛГ.
4. **Розовый фон и вертикальные штрихи появились в зоне результата в течение периода тестирования. Является ли это поводом для беспокойства?** Нет. Каждый образец мочи отличается по своему химическому составу, а также он зависит от влажности воздуха в зоне (помещении) проведения теста. Такие изменения физических условий могут вызвать вертикальные штрихи и/или розовый фон, но это не влияет на результаты теста.
5. **Алкоголь и лекарства могут повлиять на результат теста?** Нет. Однако, если вы принимаете какие-либо лекарства, вы должны проконсультироваться с врачом.
6. **Когда самое подходящее время для полового акта после получения положительного результата теста?** Овуляция должна начаться в течение 24-48 часов. Это время наиболее плодородное. Поэтому половой акт рекомендуется именно в это время.
7. **В настоящее время я использую метод базальной температуры тела (БВТ). Заменяет ли этот тест БВТ?** Повышенная базальная температура тела прежде всего показывает, что овуляция уже произошла. **Maria Baby Strip** тест показывает, когда овуляция может произойти.
8. **Результат теста был положительным и в течение 24-48 часов у меня был половой акт. Но беременность не наступила. Что мне делать?** На наступление беременности может повлиять ряд факторов. В некоторых случаях **Maria Baby Strip** тесты надо использовать 3-4 месяца. Если беременность в течение 3-4 месяцев не наступила, обратитесь к врачу вместе со своим партнером.
9. **Может ли на результат повлиять потребление жидкости?** Примерно два часа до забора образца мочи, мы рекомендуем ограничить прием жидкости. Это потому, что повышенное потребление жидкости перед тестированием разбавит количество гормонов в моче.

ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ НА УПАКОВКЕ

- Беречь от солнечных лучей!
- Хранить при температуре от 4°C до 30°C
- Хранить в сухом месте
- Не используйте повторно

Производитель: Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. No. 8, Lizhishan Road, Science City, Luogang District, 510663, Guangzhou, Китай.

Уполномоченный представитель в ЕС:

Qarad b.v.b.a., Ciplastraat 3, B-2440 GEEL, Бельгия.

Распространитель: OOO Elvum, Курземель проспект 36, Рига.

Латвия. Тел.: +371 67 808440.

www.marialine.lv

Ревизионный номер MBS 032016

